

Dodawanie nowego użytkownika

1. Wejść do aplikacji dla opiekuna
2. Kliknąć na „Zarządzanie użytkownikami”. Wyświetli się lista obecnych użytkowników
3. U dołu ekranu znajduje się przycisk „Dodaj nowego użytkownika”
4. W ekranie dodawania nowego użytkownika możemy ustawić mu :
 - 4.1. imię,
 - 4.2. nazwisko,
 - 4.3. rozmiar czcionki i obrazka w sekcji „Tryb wyświetlania aktywności”
 - 4.3.1. Duży: duża czcionka, mały obrazek, 6 aktywności do wyboru w przerwie i GA
 - 4.3.2. Mały: mała czcionka, duży obrazek, 4 aktywności do wyboru w przerwie i GA
 - 4.3.3. Średni: opcja pośrednia), 2 aktywności do wyboru w przerwie i GA
 - 4.4. Tryb wyświetlania czynności (czyli podplanu w aktywności):
 - 4.4.1. Zaawansowany: widok w postaci listy
 - 4.4.2. Podstawowy: widok w postaci slajdu
 - 4.5. Tryb wyświetlania aktywności z planu
 - 4.5.1. Zaawansowany: widok w postaci listy
 - 4.5.2. Podstawowy: widok w postaci slajdu
 - 4.6. Dźwięk timera
 - 4.6.1. Aby ustawić dźwięk timera należy:
 - 4.6.1.1. kliknąć na przycisk „Wybierz”
 - 4.6.1.2. Przejść do folderu, w którym jest plik dźwiękowy
 - 4.6.1.3. Kliknąć na plik dźwiękowy
 - 4.6.2. Aby odsłuchać dźwięk timera należy:
 - 4.6.2.1. Kliknąć na przycisk „odślučaj”
5. Na końcu należy nacisnąć przycisk „Zapisz”
6. W rezultacie na liście użytkowników zobaczymy nowego. Żółty kolor oznacza, że ustawienia danego użytkownika są aktualnie brane pod uwagę w aplikacji dla dziecka.